


健常者用昇降台車 KYS-A0116

(KYS-A6213/KYS-A6112a オプション品)

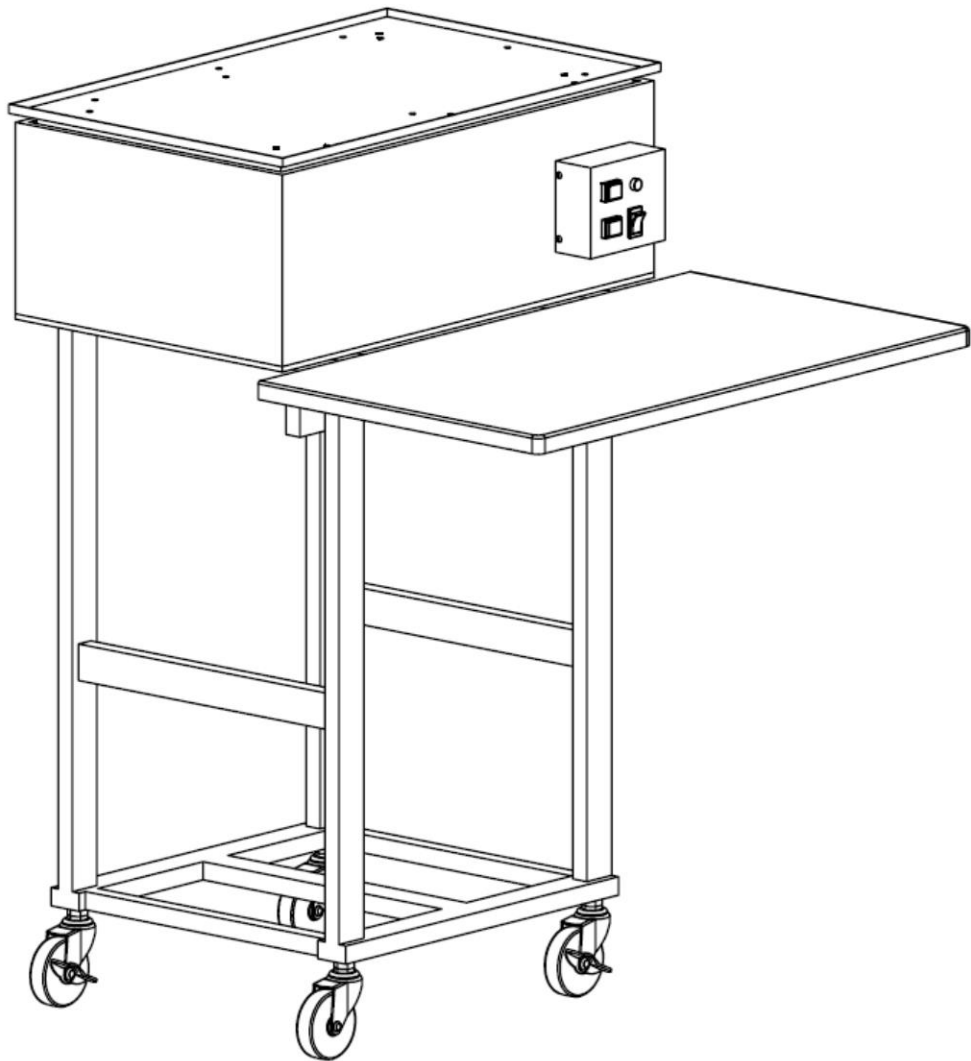

〈使用方法〉

1. 卓上視覚検査器(KYS-A6213)/ 選別視力検査器(KYS-A6112a) を昇降台車に載せ、付属の電源コードのソケットを本体インレットに接続しプラグをAC100Vに接続する。各検査器の電源コードを本体アウトレットに接続して使用することにより、検査器の電源の入/切を本体電源スイッチで行うことができる。
2. 本体電源スイッチを入にした後、上昇または下降スイッチを使って検査装置を載せた昇降台車を上下動させ、検査器のレンズの高さを被験者の目の高さに合わせる。

(上昇および下降スイッチは押している間上下動し、離すとその位置で停止する)

〈仕様〉

高さ調整	電動式
高さ調整範囲	1000～1200mm(床面より)
寸法	1000(高)×800(幅)×700(奥行)mm
重量	約36kg
電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	約80W

〈寸法〉

